

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARAR TRANSET UNA VEZ AL DÍA



1 INSERTAR JERINGAS



2 CONECTAR TRANSET A INYECTOR



3 CONECTAR LOS DEPÓSITOS DE MEDIOS DE CONTRASTE Y SALINOS



4 CONNECTING CONTRAST AND SALINE MEDIA TANKS

PREPARE TRANSFLUX ONCE PER PATIENT



1 MANTENGA TRANSFLUX™ EN POSICIÓN VERTICAL Y ENJUAGUE



2 INSERTAR UNA AGUJA EN UNA VENA O A TRAVÉS DE UN PORT-A-CATH



3 CONECTE EL TRANSFLUX™ A LA AGUJA



4 COMPROBAR REFLUJO SANGUÍNEO USO DE LA FUNCIÓN DE DESCONEXIÓN



5 VUELVA A CONECTAR Y COMPRUEBE TODAS LAS CONEXIONES




6 CONECTAR TRANSFLUX™ A TRANSET™

DESPUÉS DE LA INYECCIÓN



1 CIERRE LAS ABRAZADERAS Y DESCONECTE LA VÁLVULA

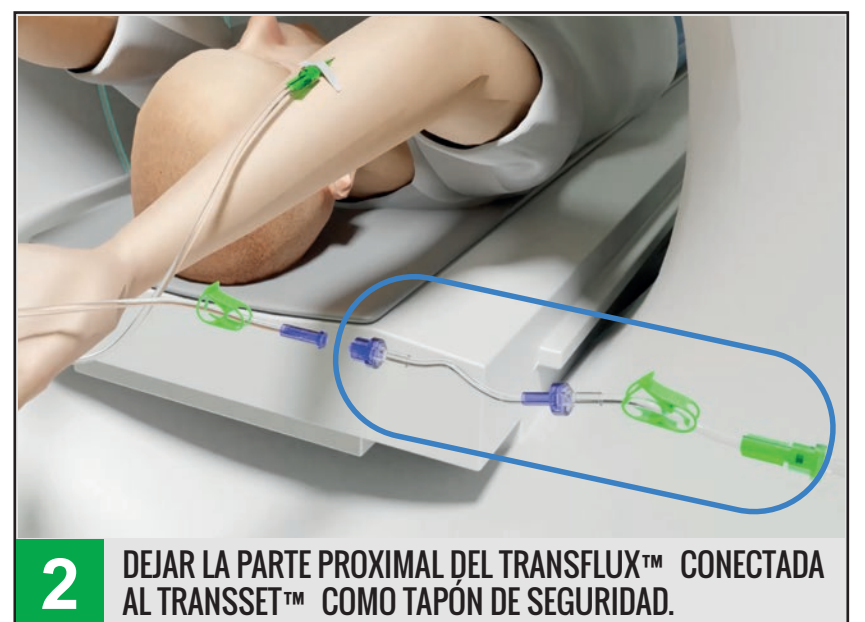

2 DEJAR LA PARTE PROXIMAL DEL TRANSFLUX™ CONECTADA AL TRANSET™ COMO TAPON DE SEGURIDAD.



3 RETIRE LA PARTE PROXIMAL DEL TRANSFLUX USADO ANTES DE INSTALAR UN NUEVO TRANSFLUX™